

**BRONIGEN®**

## **КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ИНВАЛИДНЫЕ СКЛАДНЫЕ**

---

**Инструкция по эксплуатации**



**Модели: BCH-1000, BCH-1200, BCH-1300, BCH-1400, BCH-1500**

---

---

---

---

---

**Благодарим Вас, что Вы выбрали кресло-коляску марки BRONIGEN®. Перед началом использования кресла-коляски ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по эксплуатации. Это поможет Вам использовать кресло-коляску наиболее эффективно.**

## **Комплектация**

В комплект входит:	BCH-1000	BCH-1200	BCH-1300	BCH-1400	BCH-1500
Стальной корпус	Окрашенный	Хромированный	Окрашенный	Окрашенный	Хромированный
Подножки	Съёмные	Съёмные	Съёмные	Съёмные	Съёмные с упорами для голени
Боковины	Съёмные, с укороченным подлокотником	Фиксируемые	Съёмные, с укороченным подлокотником	Съёмные, с укороченным подлокотником	Съёмные, с укороченным подлокотником
Тип передних колёс	Литые	Литые	Литые	Полиуретановые	Полиуретановые
Тип шин задних колёс	Литые	Литые	Пневматические	Пневматические	Пневматические
Воздушный насос	нет	нет	есть	есть	есть
Инструкция по эксплуатации	есть	есть	есть	есть	есть

## **Назначение**

Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для самостоятельного перемещения больных и инвалидов с нарушенными функциями опорно-двигательного аппарата.

---

## **Область применения**

Кресло-коляска используется взрослыми больными и инвалидами для перемещения в лечебном учреждении, дома или в других помещениях. Кресла-коляски с литыми шинами заднего колеса (BCH-1000, BCH-1200) могут использоваться для прогулок при перемещении на открытых площадках с твёрдым ровным покрытием.

Кресла-коляски с пневматическими шинами заднего колеса (BCH-1300, BCH-1400, BCH-1500) используются взрослыми больными и инвалидами как для прогулок и перемещения в уличных условиях, так и для перемещения в помещениях (лечебном учреждении, квартире и других помещениях).

Кресла-коляски, имеющие боковины с укороченными подлокотниками, позволяют пользователю вплотную подъезжать к столу и использовать стол для работы в кресле.


## **Оказываемые эффекты**

Кресло-коляска приводится в движение мускульной силой пользователя. Использование кресла-коляски активизирует физическую деятельность, а также расширяет двигательные возможности больного или инвалида.


## **Правила использования**




1. Для раскладывания сложенного кресла надавите на трубы сидения. Будьте осторожны, чтобы ваши пальцы не попали в пространство между боковинами кресла и трубками сидения.

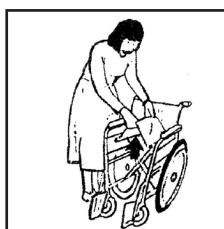


2. Для складывания кресла поднимите опоры подножек, а затем потяните сидение вверх.

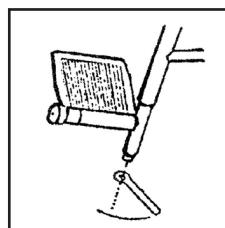


3. Для регулировки высоты подножек используйте болт-фиксатор на подножках.

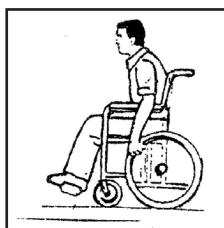


4. Пользователь легко может передвигаться самостоятельно.

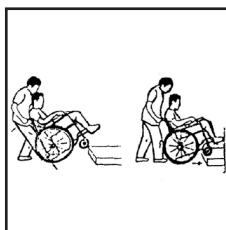


5. Для подъёма по ступенькам сопровождающему необходимо отклонить кресло назад.

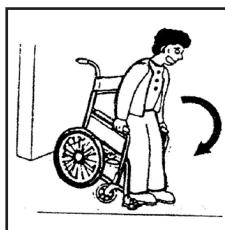


6. Никогда не наступайте на подножки при вставании и посадке в кресло.

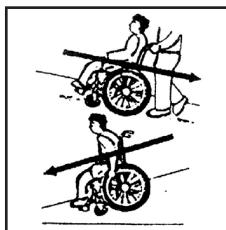


7. Крепко держитесь при спуске и подъёме по наклонной плоскости.

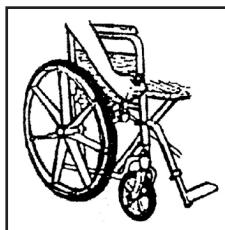

8. Для постановки колёс на тормоза, переведите тормозную рукоятку вперёд.

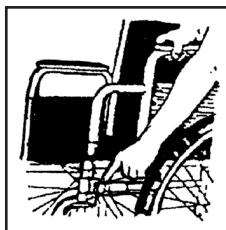

9. Для снятия боковин (для моделей со съёмными боковинами) нажмите на нижний замок и вытащите вверх боковую плату.

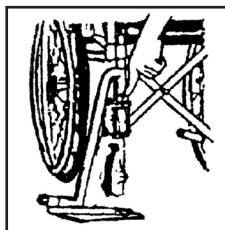

10. Для снятия подножек нажмите на фиксатор для снятия подножек с фиксации.

## Меры предосторожности

- Перед использованием кресла-коляски убедитесь, что трубы зафиксированы, во избежание травм во время движения.
- Перед посадкой и вставанием с кресла заблокируйте колёса тормозами.
- Не используйте ручной тормоз во время движения. Тормоза используются только для блокировки колёс при парковке.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать подножки как опорную платформу при посадке в кресло и вставании из кресла.
- Не рекомендуется использовать кресло на дорогах с ухабистой поверхностью.
- Не используйте кресло-коляску со спущенными камерами в пневматических шинах.

---

## **Противопоказания**

Максимальный вес пациента не должен превышать:

100 кг (модели ВСН-1000, ВСН-1200, ВСН-1400, ВСН-1500),

150 кг – для модели ВСН-1300.

## **Правила ухода за креслом-коляской**

- Для чистки кресла-коляски используйте тёплую воду с нейтральным моющим средством. После чистки вытрите все детали насухо тряпкой. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и др.), а также сильнодействующие моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и острые инструменты.
- Особо загрязненные части очищайте с помощью мягкой щётки.
- Не допускайте повреждения обивки твёрдыми и острыми предметами.
- Механизм складывания периодически смазывайте машинным маслом.
- В случае прокола камеры в пневматическойшине необходимо заменить или отремонтировать камеру.
- Регулярно следите за давлением в камерах.

## **Правила хранения**

- Храните кресло-коляску после использования в сухом чистом месте.
- Не подвергайте кресло-коляску воздействию высокой температуры, влажности и пыли.
- Температура хранения кресла-коляски от -20°С до +60°С.
- При хранении оберегайте кресло-коляску от воздействия прямых солнечных лучей.

## **Правила утилизации**

Утилизация кресла-коляски осуществляется по правилам утилизации лома, содержащего сталь, действующим на территории потребителя.

## **Гарантии производителя**

Гарантия на кресла-коляски составляет 12 месяцев с момента покупки при отсутствии повреждений вследствие удара, механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию.

Срок службы кресел-колясок составляет не менее 3 лет.

---

---

---

## Технические характеристики

Характеристика/ Модель	BCH-1000	BCH-1200	BCH-1300	BCH-1400	BCH-1500
Ширина сидения, см	41 или 46	46	51	41 или 46	46
Ширина кресла, см	60	60	70	60	60
Ширина в сложенном виде, см	27	22	27	27	27
Глубина сидения, см	40	40	40	40	40
Высота сидения, см	50	50	50	50	50
Высота от пола до рукоятки, см	90	87	92	90	90
Диаметр заднего колеса, см	61	59	60	61	61
Диаметр переднего колеса, см	8	8	8	8	8
Максимальная нагрузка, кг	100	100	125	100	100
Вес, кг	18,5	17,6	20	19	20



ИМ 24

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ,  
Германия, 04316, Лейпциг, Херман-Сандер штрассе, 27.  
**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп»,  
Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.  
**Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я №60.

INTOK-BR-BCH-N1