



## **ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ НА СИДЕНИЕ**

---

**Инструкция по эксплуатации**



**Артикул: П21**

- с гелевыми вставками**
- без гелевых вставок**

---

---

---

---

**Благодарим Вас за то, что Вы выбрали ортопедическую противопролежневую подушку марки BRONIGEN. Перед началом использования подушки ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по эксплуатации. Это поможет Вам использовать подушку наиболее эффективно.**

## **Назначение**

Ортопедическая подушка противопролежневая на сидение предназначена для предотвращения пролежней, уменьшения нагрузки на тазовую область и бедра во время длительного сидения в инвалидных креслах-колясках и креслах-каталках. Подушка может использоваться как средство реабилитации при травмах тазовой области, после операций на области промежности.

Поверхность подушки имеет анатомический профиль с углублениями для размещения бедер и ягодиц. Профиль поверхности способствует равномерному распределению давления и снижению нагрузки на поверхность тела. Гелевые вставки (для моделей с гелевыми вставками) дополнительно снижают давление на поверхность тела в области седалищных бугров.

Подушка может использоваться в креслах и каталках и других видах сидений шириной от 40 до 44 см.

## **Комплектация**

- Подушка.
- Воздухопроницаемая наволочка.
- Съёмный водонепроницаемый защитный чехол.
- Упаковка из ПВХ.
- Инструкция по эксплуатации.

## **Технические характеристики**

Размер основания подушки	40 x 40 см
Высота подушки	6 см
Вес подушки без гелевых вставок	1,3 кг
Вес подушки с гелевыми вставками	2 кг

---

---

---

## **Показания к применению**

- Профилактика пролежней в области ягодиц, седалищных бугров, задней поверхности бедер при длительном сидении в инвалидных креслах и сидячих каталках.
- Обеспечение максимального комфорта при длительном сидении в креслах-колясках и в креслах-каталках.
- Комплексная реабилитация травм тазовой области.
- Реабилитация после заболеваний и операций в области промежности.
- Болевые синдромы в области крестца, крестцово-подвздошных сочленений, копчика, седалищных бугров.
- Дискомфорт и мышечное напряжение в области ягодиц и задней поверхности бедер при длительном сидении.

## **Ограничения и противопоказания к применению**

При наличии открытых пролежней перед применением подушки необходимо посоветоваться с врачом.

## **Правила использования**

При размещении подушки на основании сидения кресла-коляски или кресла-каталки углубления для бедер должны располагаться в передней части сидения.

Для предотвращения деформации подушку не следует скручивать или складывать.

При первичном использовании подушки возможен период привыкания к подушке, но не более 2-х недель.

При температуре воздуха ниже 1°C возможно уплотнение пенополиуретана. Поэтому не рекомендуется использовать подушку при температуре ниже 1°C более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавливаются после нагревания подушки до комнатной температуры.

Подушка используется только в наволочке и чехле BRONIGEN. Во избежание потери противопролежневого эффекта не используйте другие наволочки, чехлы или иные покрытия на подушку.

---

---

## **Лечебные эффекты**

- Разгрузка ягодиц, задней поверхности бедер, седалищных бугров.
- Коррекция положения туловища при длительном сидении.
- Нормализация кровообращения в области таза и промежности при длительном сидении.
- Нормализация тонуса мышц пояса нижних конечностей и нижней части поясничного отдела.
- Повышение комфортности при длительном сидении в инвалидных креслах, сидячих каталках.

## **Преимущества использования противопролежневой подушки BRONIGEN**

- Сочетание материалов, конструкции и формы подушки снимает нагрузку на тазовую область и заднюю поверхность бедер.
  - Внутренняя наволочка из прочного влагостойкого материала облегчает уход за подушкой.
  - Внешняя наволочка изготовлена из дышащего материала Ткань 3D-mesh, что уменьшает потливость и обеспечивает нормальное кожное дыхание.
  - Удобная ручка позволяет при необходимости легко перемещать подушку.
  - Гарантированное сохранение формы на протяжении 1 года ежедневного использования.
  - Полная комплектация (основа из пенополиуретана, внутренняя съемная наволочка из влагостойкого материала, наружная наволочка из дышащего материала 3D-mesh).
  - Размеры подушки позволяют использовать подушку в большинстве инвалидных кресел и сидячих каталок.
-

---


## Состав и характеристика материалов:

### Артикул П21 без гелевых вставок

Подушка — 100% эластичный пенополиуретан.

Наволочка — 100% полиэстер.

Чехол — 100% полиэстер.

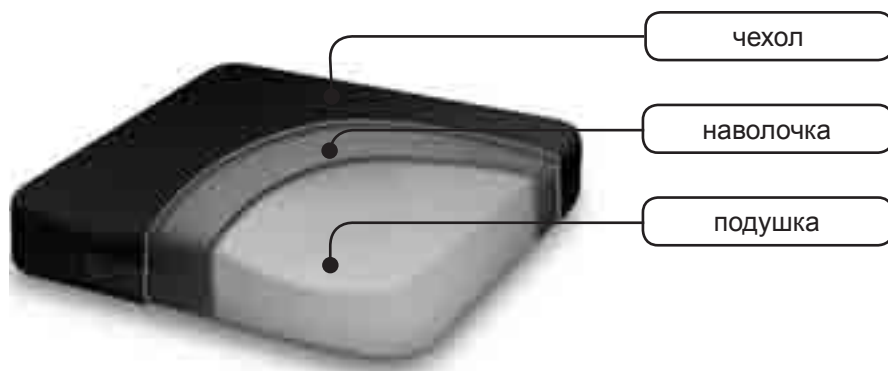


### Артикул П21 с гелевыми вставками

Подушка — 80% эластичный пенополиуретан, 3% ПВХ, 17% гель.

Наволочка — 100% полиэстер.


Чехол — 100% полиэстер.

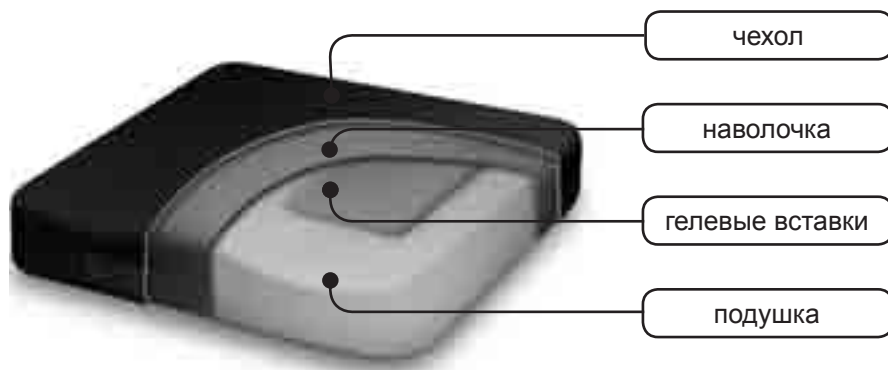

---

## Правила ухода за изделием

- Съемный чехол и наволочку, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим).
- Не использовать отбеливатели и органические растворители.
- Возможна барабанная сушка не выше 50°C.
- Глажение при температуре 110°C.

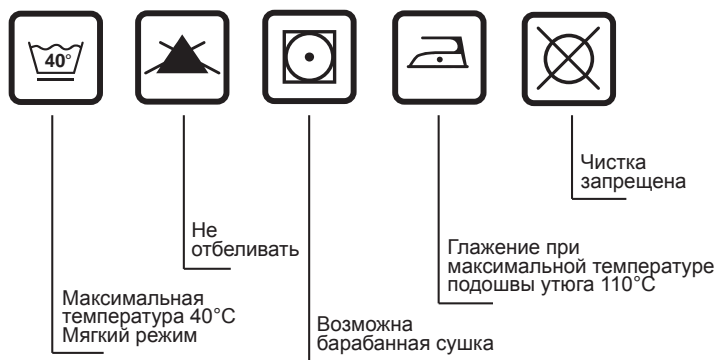

## Гарантии производителя

- Гарантийный срок на подушку: 1 год.
- Гарантийный срок на наволочку: 6 месяцев.
- Срок службы: не менее 1 года.
- При использовании подушки свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта.
- Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки.

## Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

## Способ утилизации

Подушка и чехол утилизируются вместе с бытовым мусором.

---

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок действует с даты продажи, указанной продавцом в гарантийном талоне при продаже изделия.
2. Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки и наволочки.
3. Гарантия действительна только при использовании изделия в соответствии с инструкцией.

**Торговая организация**  
(название, адрес, контактный телефон)

**Дата продажи**

**Печать торговой организации**

**Подпись продавца**

**С условиями гарантии ознакомлен**  
**Подпись покупателя**



ТУ № 9396-003-88419706-2008

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В02543 от 20.04.2009 г.  
выдан ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ».

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№77.99.24.933.Д.010858.09.09 от 16.09.2009 г.  
выдано ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека.

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития РУ № ФСР 2009/04606 от 15.04.2009 г.

**Дата изготовления и упаковывания:**

**Производитель:**

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.

[www.trelaxorto.ru](http://www.trelaxorto.ru)